

BLAST® BANDAGE

Teile-Nr.: **BLAST** | NSN-Nr.: **6510-01-586-4314**
US-PATENT: 7,663,015



GEBRAUCHSANWEISUNG

Zur Anwendung der Bandage
auf Wunden an Extremitäten

DIE SCHRITTE 1-3 BEFOLGEN

1



Verletzte Extremität mittig auf
der Wundauflage platzieren

2



Wundauflage über der
Extremität zusammenfalten

3



Wundauflage mit elastischer Bandage fixieren

GEBRAUCHSANWEISUNG

Zur Anwendung der Bandage
auf Abdominalverletzungen


DIE SCHRITTE 1b-3b BEFOLGEN

1b



Wundverschlussfolie aus
dem Beutel entnehmen

2b

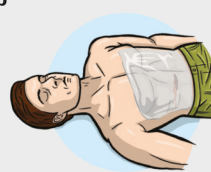

Wunde mit Wundver-
schlussfolie abdecken

3b



Mit Wundauflage abdecken und mit elastischer Bandage fixieren



TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS®, LLC

TELEFON 864 224 0081
GEBÜHRENFREI 1 888 822 6331
FAX 864 224 0064
E-MAIL info@tacmedsolutions.com
WEBSITE tacmedsolutions.com
1250 Harris Bridge Road, Anderson, SC 29621