



ANLEITUNG

BEIDHÄNDIGE ANWENDUNG

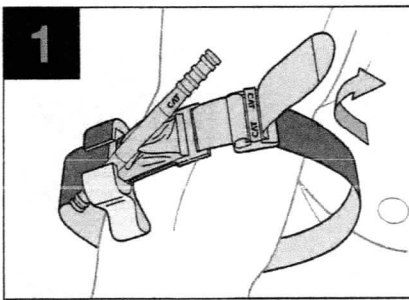


Legen Sie das Band um die Extremität, schieben Sie die Spitze durch den Schlitz der Schnalle und positionieren Sie den **CAT** 2-3" [etwa 5-8cm] oberhalb der blutenden Stelle direkt auf der Haut.*

EINHÄNDIGE ANWENDUNG

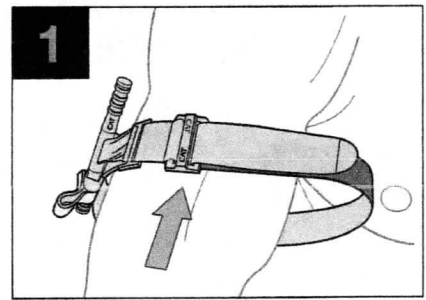


Schieben Sie die verletzte Extremität in die Schlaufe des Bandes und positionieren Sie den **CAT** 2-3" [etwa 5-8cm] oberhalb der blutenden Stelle direkt auf der Haut.*


Oder

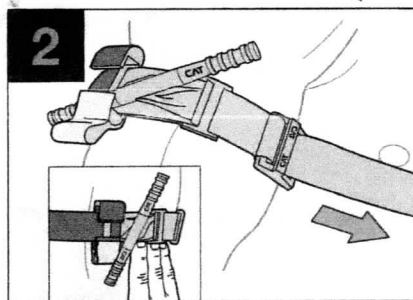


Ziehen Sie das Band fest und wickeln Sie es zum Befestigen rund um die Extremität, aber nicht über die Stabklemmen. Das Band sollte so fest sitzen, dass die Spitzen von drei (3) Fingern nicht zwischen Band und Extremität geschoben werden können. Wenn die Spitzen von drei (3) Fingern unter das Band geschoben werden können, erneut festziehen und sichern.

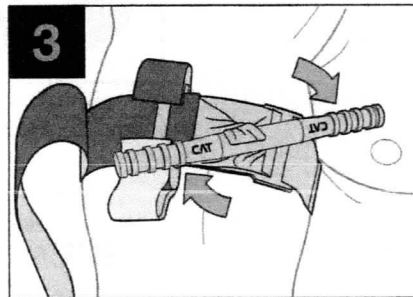

Drehen Sie den Stab, bis die Blutung gestoppt ist.

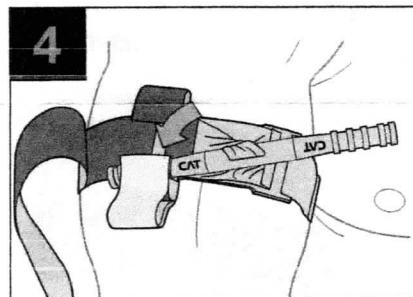

Sichern Sie den Stab in einem Clip, um ihn zu befestigen. Prüfen Sie die Blutung und den distalen Puls. Wenn die Blutung nicht unter Kontrolle gebracht wurde, oder wenn ein distaler Puls vorhanden ist, erwägen Sie ein noch stärkeres Festziehen oder legen Sie einen zweiten **CAT** über und neben dem ersten an. Danach neu bewerten.

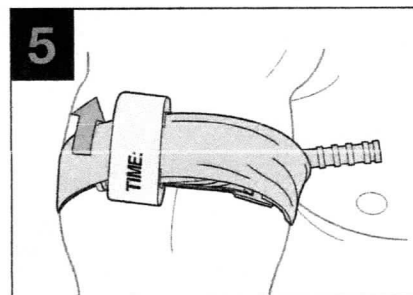

Führen Sie das Band zwischen die Clips und über den Stab. Sichern Sie Stab und Band mit dem TIME-Riemen. Halten Sie den Zeitpunkt der Anwendung darauf fest.

* Wenn Sie nicht sicher sind oder sich aufgrund der Situation die zusätzliche Zeit nicht nehmen können, um zu untersuchen, woher die Blutung kommt, kann der **CAT** auch effektiv über der Kleidung so hoch an Arm oder Bein wie möglich angebracht werden. Der **CAT** darf NICHT über festen Objekten innerhalb der Kleidung angelegt werden. Sobald es die Situation erlaubt, sollte die verletzte Extremität erneut bewertet und der **CAT** 2-3" [etwa 5-8cm] über der Verletzung direkt auf der Haut neu positioniert werden.