

OLAES® MODULARE BANDAGE

4"-Bandage Teile-Nr.: **OAL-4** | 6"-Bandage Teile-Nr.: **OAL-6** | 4"-Bandage, flach verpackt
Teile-Nr.: **OALFP-4**

NSN-Nr.: **6510-01-558-3342**

US-PATENT 7,652,190; weitere US-Patente und ausländische Patente ausstehend.



GEBRAUCHSANWEISUNG


Anlegen der Bandage

1




Aufreißen

2

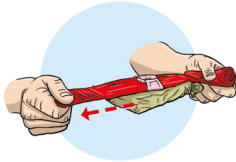


Ziehen

3

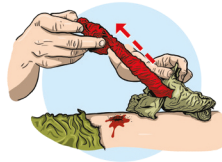

Gaze entfernen

4

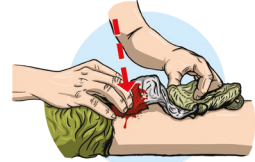

Gaze auf der Wunde
platzieren

5




Bandage darüber
platzieren

6



Umwickeln

7

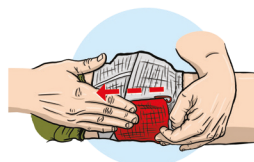

Fixieren

CE 1984

STERILE R



MEDIC-
BANDAGES
www.medic-bandages.de



TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS, LLC

TELEFON +1 864 224 0081
GEBÜHRENFREI (USA) +1 888 822 6331
FAX +1 864 224 0064
E-MAIL info@tacmedsolutions.com
WEB tacmedsolutions.com
1250 Harris Bridge Road, Anderson, SC 29621

