

SOF® TOURNIQUET

Teile-Nr.: 84-0009 | NSN-Nr.: ZUR PATENTIERUNG ANSTEHEND
US-PATENT 8,303,620 und D649,642 und 7,776,064



GEBRAUCHSANWEISUNG

Anlegen des Tourniquets

1



Tourniquet über die Extremität ziehen

2



Fest anziehen

3



Knebel drehen

4



Knebel im Clip einhaken

5



Knebel im Dreieck sichern

6



Uhrzeit notieren

Anlegen des Tourniquets, wenn es nicht über die Extremität gezogen werden kann
Führen Sie die Schritte 1b–4b aus

1b



Schnalle anheben

2b




Schnalle drehen, um sie abzulösen

3b



Um die Extremität legen

4b

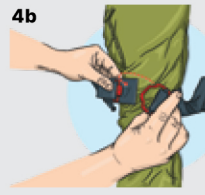

Schnalle schließen und dann mit Schritt 2 fortfahren

SOF® Tourniquet
Zur Regulierung starker Blutungen.

Lagerung des SOF® Tourniquets
Bewahren Sie das Tourniquet mit geschlossener Schnalle und ausreichender Größe der Schlaufe auf, so dass das Tourniquet über die Extremität gezogen werden kann.



TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS, LLC

TELEFON +1 864 224 0081

GEBÜHRENFREI!

(USA) +1 888 822 6331

FAX +1 864 224 0064

E-MAIL info@tacmedsolutions.com

WEB tacmedsolutions.com

1250 Harris Bridge Road, Anderson, SC 29621, USA

CE 1984

